



## Instructions de prélèvement d'échantillons Test de sexe de bébé

Veuillez vous assurer de lire attentivement les instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait affecter la validité de votre échantillon ou résultat.

### Vérifiez les Formulaires

1. Vérifier que l'âge gestationnel est enregistré et qu'il est supérieur à 10 semaines à la date de collecte.
2. Vérifiez que le patient a lu les informations de consentement et a signé le formulaire de demande.

### Prélèvement de l'échantillon

1. Le client n'a pas besoin de jeûner avant de faire le prélèvement sanguin requis. **Il est important qu'aucun homme ne soit présent pour la collecte de ces échantillons.**
2. Tirez 7-10 ml de sang dans le tube Streck fourni. **Un minimum de 7ml DOIT être collecté.**
3. **Secouer immédiatement le tube en l'inversant doucement plusieurs fois :**



4. Complétez les détails du patient sur le tube avec leur nom complet et leur date de naissance au format JJ/MM/AAAA.
5. Enregistrer et parapher la date de prélèvement sanguin sur le formulaire de prélèvement d'échantillons. **Tous les échantillons de sang doivent être prélevés par une personne qualifiée.**

### Emballage de l'échantillon

1. Remettez le tube de sang dans l'étui absorbant et l'étui à bulles fourni dans le kit. Placez le tube protégé dans le sac de risque biologique et scellez-le.
2. Placez le(s) sac(s) risque biologique contenant le(s) échantillon(s) dans l'emballage d'origine, puis placez le(s) échantillon(s) et tous les documents/formulaires pertinents dans le cartable de retour fourni.
3. **Ne réfrigérez, essorez ou congelez pas le(s) échantillon(s).**

### Retour de l'échantillon

1. Veuillez voir la **feuille d'instructions « Retour d'Échantillon »** à l'intérieur du kit pour avoir des instructions sur la façon de nous renvoyer les échantillons pour les tester.